

# EQUICAST

## HUFSCHUTZBANDAGE



1



2



3



4



5



6



7

Die **EquiCast Hufschutzbandage** dient zum Schutz schlechter und verletzter Hufe. Sie kann einzeln oder in Verbindung mit Hufeisen, Pads oder vielen anderen Hufprodukten verwendet werden.

Die Bandage enthält ein spezielles Harz, welches bei Kontakt mit Wasser und Luftfeuchtigkeit aushärtet. Nachdem es ausgehärtet ist, können Sie ein Hufeisen oder andere Produkte zum Schutz des Hufs direkt auf die Bandage nageln oder kleben. Es ist auch möglich über ein Hufeisen zu bandagieren.

- Originalverpackt bis zu 2 Jahren haltbar.
- Luftdurchlässig und antibakteriell. Um den Huf zu verbinden müssen keine speziellen Vorbereitungen getroffen werden, der Huf muss nur trocken sein.
- Unterstützt den Huf bei Hufrehe ohne zu nageln.
- Eignet sich hervorragend zur Umstellung von Beschlag auf Barfuß.
- Hält ohne Hufeisen, je nach Beanspruchung, etwa 4 Wochen. Mit einem Hufeisen etwa eine Beschlagperiode lang.
- Man kann den Huf problemlos durch die Bandage röntgen oder die Huftemperatur mit einem Lasergerät messen.
- Breite: 75 mm, Länge: 3,6 m

### Anwendung

Die Bandage mit Handschuhen aus der Verpackung holen. Das Material ist weich und lässt sich gut um den vorbereiteten Huf wickeln. Voraussetzung: Der Huf sollte trocken und sauber sein.

Wenn Sie nun die Bandage sofort wässern, bleiben Ihnen etwa 2 Minuten Zeit zum Wickeln bis die Bandage härtet. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit mit der noch trockenen Bandage zu wickeln. Nach dem Wickeln den Huf absetzen, dann wieder aufnehmen und mit einem Schwamm oder Tuch die Bandage gut mit Wasser tränken. 2 - 3 Minuten warten und dann den Huf absetzen. Nochmals mit Wasser befeuchten. Fertig!

Ist die Hufsohle ganz plan, kann ein Hufeisen angepasst und aufgenagelt werden.